

MomCare Masážní přístroj na podporu laktace a masáž jizvy po císařském řezu s funkcí nahřívání a vibracemi
MomCare Masážny prístroj na podporu laktácie a masáž jazvy po cisárskom reze s funkciou nahrievania a vibráciami

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR
DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

NÁVOD K OBSLUZE

ZPŮSOBY POUŽITÍ



- Použijte celou plochu masážního přístroje a masírujte prsa směrem k bradavce. (obr.1,2)
- Jemně masírujte prsa pomocí úzké části - špičky - masážního přístroje. (obr. 3)
- Použijte úzkou část masážního přístroje a vyvíjejte mírný tlak na ucpané mlékovody. (obr. 4)
- Masírujte různé části prsu, abyste podpořili a zvýšili tok mléka. (obr. 5)

PŘED OŠETŘENÍM JIZVY PO CÍSAŘSKÉM ŘEZU SE PROSÍM PORAĎTE S FYZIOTERAPEUTEM, ABYSTE SE NAUČILI SPRÁVNOU TECHNIKU

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete pozorně návod k použití.
2. Před prvním použitím tento výrobek plně nabijte. Nenabíjete baterii po delší dobu, než je nezbytně nutné. Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, dojde ke ztrátě elektrické kapacity baterie. V takovém případě ji prosím nabijte, aby se opět aktivovala. Po nabití prosím počkejte 10 minut, aby se výrobek aktivoval. Pokud nedojde k aktivaci do půl hodiny, kontaktujte prosím zákaznický servis pro vyřízení.
3. Používejte prosím nabíjecí kabel USB, který je součástí tohoto výrobku, a nepoužívejte nabíjecí kabel USB jiného výrobce, aby nedošlo k poškození výrobku.
4. Používejte prosím adaptér se vstupním napětím AC100 – 240V, výstup DC5, 1A.
5. Tento nabíjecí kabel USB lze použít pouze s tímto výrobkem. Pokud dojde k poškození výrobku z důvodu použití jiného nabíjecího kabelu, společnost nenese odpovědnost za vadu a není povinna nahradit škodu.
6. Pokud je výrobek poškozen, pošlete prosím krátké video a fotografie, napište podrobnou zprávu o problému a zašlete ji naší společnosti. Pokud je porucha způsobena nevhodným používáním (například špatné uložení, jiný použitý USB kabel, příliš dlouhé nabíjení), společnost není povinna výrobek opravit nebo vyměnit za zcela nový.
7. Při likvidaci výrobků se zabudovanými bateriemi se řiďte příslušnými právními předpisy platnými ve vaší zemi.

TIPY

1. Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li někde poškozený, ihned jej přestaňte používat.
2. Před a po každém použití otřete výrobek vlhkým hadříkem. Výrobek udržujte v čistotě.
3. Výrobek NEOTÍREJTE horkou vodou nebo alkoholem a nenamáčejte.
4. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
5. K čištění nepoužívejte žíravé chemikálie.
6. Neumisťujte výrobek do blízkosti zdroje ohně.
7. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
8. Skladujte na chladném a suchém místě.


PŘEDSTAVENÍ FUNKCÍ

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí a přepínač režimů

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka výrobek zapnete, bude svítit bílé světlo a motor jednou zavibruje. Krátkým stisknutím přepínáte mezi různými režimy vibrací (8 režimů cyklicky přepínaných). Opětovným dlouhým stisknutím výrobek vypnete.

2. Tlačítko zapnutí/vypnutí nahřívání

Dlouhým stisknutím zapnete funkci nahřívání, bude svítit červené světlo. Opětovným dlouhým stisknutím nahřívání vypnete.

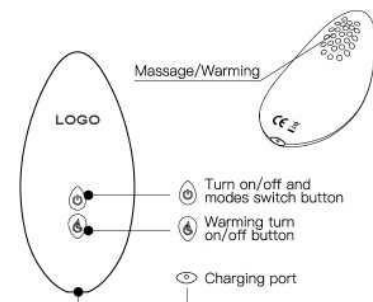

3. Nabíjení

Před použitím výrobek zcela nabijte, nabíjecí kolík vložte do nabíjecího otvoru, kontrolka začne blikat. Blikající kontrolka znamená, že se výrobek nabíjí a stále svítící kontrolka znamená, že nabíjení je dokončeno.

Tento výrobek se nabíjí pomocí nabíjecího kabelu USB a existuje několik způsobů nabíjení:

1. Lze jej připojit k portu USB počítače (výstup DC 5V/A).
2. Lze připojit k powerbance (výstup DC 5V/A).
3. Lze připojit k adaptéru (výstup DC 5V/1A).

Po úplném nabití odpojte nabíjecí kabel ze zásuvky.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Name	Lactation & C-Section Scar Massager		
Model	TCG-003	Weight	65g
Texture	Silicone/PA66	Size	45X95X30mm
Battery capacity	400mA	Quantity	1pc
Charging time	Usage time 2 hours	Place of Origin	China
Usage time	>50 minutes	Warranty Time	1 year
Noise decibel	<50dB	Year of manufacture	Marked on the packaging
Waterproof Level	IPX7	Recommand using scenes	Please use indoors
Function	Vibration (8 frequency)		

- Nahřívání
- Snadné přenášení
- IPX7 Vodotěsný
- 2 programy & 8 režimů

Výrobce:

MomCare Kft., Szugló utca 82, 1141 Budapest.

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

SPÔSOBY POUŽITIA



- 1 Použite celú plochu masážneho prístroja a masírujte prsia smerom k bradavke. (obr.1,2)
- 2 Jemne masírujte prsia pomocou úzkej časti – špičky – masážneho prístroja. (obr. 3)
- 3 Použite úzku časť masážneho prístroja a vyvíjajte mierny tlak na upchaté mliekovody. (obr. 4)
- 4 Masírujte rôzne časti prsníka, aby ste podporili a zvýšili tok mlieka. (obr. 5)

PRED OŠETRENÍM JAZVY PO CISÁRSKOM REZE SA PROSÍM PORAĎTE S FYZIOTERAPEUTOM, ABY STE SA NAUČILI SPRÁVNU TECHNIKU

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím tohto výrobku si prosím pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Pred prvým použitím tento výrobok plne nabite. Nenabíjajte batériu po dlhšiu dobu, než je nevyhnutné. Pokiaľ nebudete výrobok dlhšiu dobu používať, dôjde k strate elektrickej kapacity batérie. V takom prípade ju prosím nabite, aby sa opäť aktivovala. Po nabití prosím počkajte 10 minút, aby sa výrobok aktivoval. Pokiaľ nedôjde k aktivácii do pol hodiny, kontaktujte prosím zákaznícky servis pre vyriešenie.
3. Používajte prosím nabíjací kábel USB, ktorý je súčasťou tohto výrobku, a nepoužívajte nabíjací kábel USB iného výrobcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.
4. Používajte prosím adaptér so vstupným napätím AC100 - 240V, výstup DC5, 1A.
5. Tento nabíjací kábel USB je možné použiť iba s týmto výrobkom. Pokiaľ dôjde k poškodeniu výrobku z dôvodu použitia iného nabíjacieho kábla, spoločnosť nenesie zodpovednosť za vadu a nie je povinná nahradiť škodu.

6. Ak je výrobok poškodený, urobte prosím krátke video a fotografie, napíšte podrobnú správu o probléme a zašlite ju našej spoločnosti. Pokiaľ je porucha spôsobená nevhodným používaním (napríklad zlé uloženie, použitý iný USB kábel, príliš dlhé nabíjanie), spoločnosť nie je povinná výrobok opraviť ani vymeniť za úplne nový.

7. Pri likvidácii výrobkov so zabudovanými batériami sa riadte príslušnými právnymi predpismi platnými vo vašej krajine.

TIPY

1. Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je niekde poškodený, ihneď ho prestaňte používať.
2. Pred a po každom použití utrite výrobok vlhkou handričkou. Výrobok udržiavajte v čistote.
3. Výrobok NEOTIERAJTE horúcou vodou alebo alkoholom a nenamáčajte.
4. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
5. Na čistenie nepoužívajte žieravé chemikálie.
6. Neumiestňujte výrobok do blízkosti zdroja ohňa.
7. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
8. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

PREDSTAVENIE FUNKCIÍ

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a prepínač režimov


Dlhým stlačením tohto tlačidla výrobok zapnete, bude svietiť biele svetlo a motor raz zavibruje. Krátkym stlačením prepínate medzi rôznymi režimami vibrácií (8 režimov cyklicky prepínaných). Opätovným dlhým stlačením výrobok vypnete.

2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia nahrievania

Dlhým stlačením zapnete funkciu nahrievania, bude svietiť červené svetlo. Opätovným dlhým stlačením nahrievanie vypnete.

3. Nabíjanie

Pred použitím výrobok úplne nabite, nabíjací kolík vložte do nabíjacieho otvoru, kontrolka začne blikať. Blikajúca kontrolka znamená, že sa výrobok nabíja a stále svietiacia kontrolka znamená, že nabíjanie je dokončené.

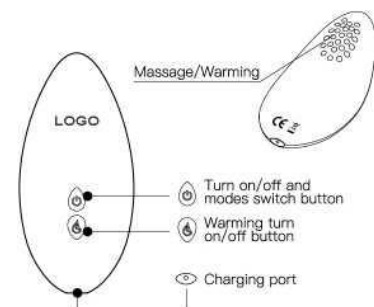

Tento výrobok sa nabíja pomocou nabíjacieho kábla USB a existuje niekoľko spôsobov nabíjania:

1. Možno ho pripojiť k portu USB v počítači (výstup DC 5V/A).
2. Možno ho pripojiť k powerbanke (výstup DC 5V/A).
3. Možno ho pripojiť k adaptéru (výstup DC 5V/1A).

Po úplnom nabití odpojte nabíjací kábel zo zásuvky.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Name	Lactation & C-Section Scar Massager		
Model	TCG-003	Weight	65g
Texture	Silicone/PA66	Size	45X95X30mm
Battery capacity	400mA	Quantity	1pc
Charging time	Usage time 2 hours	Place of Origin	China
Usage time	>50 minutes	Warranty Time	1 year
Noise decibel	<50dB	Year of manufacture	Marked on the packaging
Waterproof Level	IPX7	Recommand using scenes	Please use indoors
Function	Vibration (8 frequency)		

- Nahrievanie
- Jednoduché prenášanie
- IPX7 Vodotesný
- 2 programy & 8 režimov

Výrobca:

MomCare Kft., Szugló utca 82, 1141 Budapest.