

## **MomCare Intimní sprška, MomCare Intímna sprška**

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

### **CZ**

Ať už jde o přirozený porod nebo císařský řez, pro novou maminku v oslabeném stavu je často velmi obtížné se adekvátně očistit. Existuje však vysoké riziko infekce v důsledku čerstvých ran. Jednou z podmínek rychlé regenerace je (intimní) hygiena.

V procesu zotavení po porodu je přenosná sprška optimálním řešením pro (intimní) hygienu.

Použití:

1. Vyjměte z voděodolného obalu.
2. Odšroubujte (skládací) hlavu a nalijte vlažnou vodu do láhve.
3. Zavřete láhev a vysuňte trysku, dokud nezacvakne na své místo.
4. Zakryjte prstem vzduchovou pojistku umístěnou ve spodní části láhve, abyste zabránili úniku vody a otočte spršku dnem vzhůru.
5. Nad toaletou namiřte trysku spršky na místo, které chcete očistit a uvolněte prst ze vzduchové pojistky. Proud vody můžete regulovat otevíráním/zavíráním vzduchové pojistky a stisknutím láhve můžete ovládat i jeho sílu.

Intimní spršku můžete používat po porodu v nemocnici, v období šestinedělí, během menstruace (i při použití menstruačního kalíšku), ale i při dlouhých cestách.

Obsah: 1 ks voděodolný obal, 1 ks 300 ml přenosná intimní sprška

### **SK**

Či už ide o prirodzený pôrod alebo cisársky rez, pre novú mamičku v oslabenom stave je často veľmi ťažké sa adekvátne očistiť. Existuje však vysoké riziko infekcie v dôsledku čerstvých rán. Jednou z podmienok rýchlejšej regenerácie je (intímna) hygiena.

V procese zotavenia po pôrode je prenosná sprška optimálnym riešením pre (intímnu) hygienu.

Použitie:

1. Vyberte z vodeodolného vrecúška.
2. Odskrutkujte (skladaciu) hlavu a nalejte vlažnú vodu do fľaše.
3. Zatvorte fľašu a vytiahnite trysku, kým nezacvakne na svoje miesto.
4. Zakryte prstom vzduchovú poistku umiestnenú na dne fľaše, aby sa zabránilo úniku vody, a otočte fľašu hore dnom.
5. Nad toaletou nasmerujte sprchovú trysku na miesto, ktoré chcete vyčistiť, a uvoľnite prst zo vzduchové poistky. Prúd vody môžete regulovať otváraním/zatváraním vzduchové poistky a stlačením fľaše môžete ovládať aj jeho silu.

Intímnu spršku môžete používať po pôrode v nemocnici, v období šestonedelia, počas menštruácie (aj pri použití menštruačného kalíška), ale aj pri dlhých cestách.

Obsah: 1 ks vodeodolné vrecúško, 1 ks 300 ml prenosná intímna sprška